

Kontroll av lyftsele till personlyft

Information till användare/anhörig/personal

Checklista

Daglig kontroll

- **Inspektera lyftband och sömmar.**
Kontrollera om hål, revor, rispor eller annat slitage finns på:
 - Kantband
 - Sömmar
 - Lyftöglor (får t ex inte ha nålats eller knutits ihop)

Kontroll/inspektion var 6:e månad och/eller efter tvätt

- **Kontrollera produktetikett på lyftselen så att följande går att läsa:**
 - Maxlast
 - Storlek
 - Artikelnummer
 - Tillverkningsår
 - Serienummer
 - Tvättråd
- **Inspektera tyget i lyftselen.**
Kontrollera om slitage, hål, revor, fransning, kemiska etsmärken eller färgförändring förekommer
- **Gällande bruksanvisning ska finnas tillgänglig**

OBS! Om någon eller några av punkterna ovan har anmärkning, ska selen tas ur bruk och förskrivande enhet kontaktas för ny bedömning/utprovning av lyftsele.

Övrigt

Kom ihåg att lyftselen kan vara olämplig och eventuellt farlig att använda om brukaren minskat och/eller kraftigt ökat i vikt.

Lyftselen kan också vara olämplig att använda om funktionsförmågan förändrats, t ex förmåga att hålla huvudet, nytillkommen förlamning eller liknande.

OBS! Om något av ovanstående inträffat - Tag kontakt med förskrivande enhet för ny bedömning av lyftselebehovet.